



# OxOral®

## Aseptic flush

### OxOral® Aseptic Flush

#### FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN:

Solución Electrolizada de Superoxidación con pH Neutro y especies activas de Cloro y Oxígeno al 0.005%

**DESCRIPCIÓN:** OxOral® Aseptic Flush es una solución electrolizada de superoxidación con pH neutro que elimina virus, bacterias y hongos, la cual no emite vapores y es inocua. Ideal para desinfección de alto nivel del sistema flush de la unidad dental y antisepsia del paciente.

**ESPECTRO ANTIMICROBIANO:** El amplio espectro antimicrobiano (bactericida, virucida y fungicida) ha sido comprobado in vitro. Resultados reportados por laboratorio autorizado por la Secretaría de Salud comprueban su amplio espectro antimicrobiano, rápida acción y eficacia. Su acción germicida se demuestra de acuerdo a la NMX-BB-040-SCFI-1999, que establece como criterio 99.999% de reducción de la cuenta viable del microorganismo retado, luego de 30 segundos de contacto.

**MECANISMO DE ACCIÓN:** OxOral® Aseptic Flush contiene como ingrediente activo especies activas de cloro y oxígeno, así como elevado potencial REDOX (ORP). Inactiva virus al contacto por ruptura de enlaces y desnaturalización de componentes estructurales de envolturas y cápsidas, evitando su entrada a la célula huésped, previniendo la infección. En contacto con bacterias, hongos y esporas, induce daño oxidante al deprender electrones de sus estructuras externas, causando ruptura de enlaces químicos, extravasado del contenido intracelular y lisis osmótica, desencadenando desequilibrio en los procesos vitales del microorganismo y su inactivación. Adicionalmente, el daño ocasionado sobre la superficie del patógeno puede permitir la entrada de las especies activas de cloro y oxígeno, que oxidan estructuras y sustratos internos, coadyuvando su eliminación.

**INDICACIONES DE USO:** OxOral® Aseptic Flush es una solución electrolizada de superoxidación con pH neutro que elimina virus, bacterias y hongos en 30 segundos, con doble beneficio: desinfección y antisepsia. Seguridad total en el equipo dental y tratamiento del paciente, desinfección de la línea de irrigación que mantiene a la unidad dental libre de contaminantes y acción antiséptica para el paciente evitando posibles infecciones cruzadas.

**CONTRAINDICACIONES:** Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula.

**REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS:** Hasta la fecha no se han reportado.

**DOSIS Y MODO DE EMPLEO:** Realizar la dilución de 1:5 (1 parte de OxOral® Aseptic Flush por cada 5 de agua purificada), vaciar la dilución en el envase del sistema flush y colocarla en el equipo. Se deben purgar las mangueras al inicio y al final de la jornada durante 3 minutos, así como purgar la manguera 30 segundos entre pacientes\*

\*Uso sugerido de acuerdo a la NOM-013-SSA 1994

**PRECAUCIONES GENERALES:** No se deje al alcance de los niños. Protéjase de la luz solar.

**PRESENTACIONES:** Garrafa 3L, 5L

**RECOMENDACIONES SOBRE ALMACENAMIENTO:** Consérvase en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente, no debe exponerse directamente a la luz solar.

Reg. Núm. 0804C2019 SSA



**DOBLE ACCIÓN**  
MÁXIMA PROTECCIÓN